

Link do produktu: <https://kosmetykaistylizacja.pl/viruton-extra-1-l-plyn-do-dezynfekcji-narzedzi-p-1190.html>



VIRUTON EXTRA 1 L - PŁYN do dezynfekcji narzędzi

Cena	88,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	VIRUTON EXTRA 1L
Producent	Medi Sept

Opis produktu

Wydajny koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi. Cechy produktu: Przebadany zgodnie z nowymi normami dla środków dezynfekcyjnych (EN 14885). Wysoka tolerancja materiałowa (nie zawiera aldehydów). Szerokie spektrum mikrobójcze: bakterie, prątki, grzyby, wirusy. Wyjątkowe właściwości myjące. Niskie stężenie roztworu roboczego. Łatwy w dozowaniu dzięki zintegrowanej miarce. Korzyści dla użytkownika: Możliwość zastosowania do wielu wrażliwych materiałów jak np. endoskopy. Gwarancja skuteczności i bezpieczeństwa stosowania. Wysoka redukcja ryzyka zakażenia. Skutecznie usuwa zaschnięte zabrudzenia organiczne. Ekonomiczny w użyciu. Szybkość i wygoda w sporządzaniu roztworu. Zastosowanie: Viruton Plus to wydajny koncentrat o wyjątkowych właściwościach czyszczących i wysokiej tolerancji materiałowej. Przeznaczony jest do jednoczesnego mycia i dezynfekcji manualnej, w automatach myjących, a także w myjkach ultradźwiękowych instrumentów chirurgicznych, rotacyjnych oraz wszelkiego rodzaju endoskopów. aktywność nieużywanego roztworu roboczego wynosi 14 dni. Skuteczność mikrobiologiczna: Bakterie (w tym MRSA) wg norm EN 14561, EN 13727, (wysokie obciążenie organiczne): 1,0 % - 5 min., 0,5 % - 15 min., 0,25 % - 60 min. Grzyby wg norm EN 13624, EN 14562 (wysokie obciążenie organiczne): 1,0 % - 5 min., 0,5 % - 15 min. 0,5% - 60 min. Prątki gruźlicy wg norm EN 14348, EN 14563: 2% - 15 min.; 0,5% - 30 min.; 0,25% - 60 min. Wirusy osłonkowe (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV) wg normy EN 14476: 1,0 % - 5 min., 0,25 % - 15 min. wirusy nieosłonkowe (Adeno) wg normy EN 14476: 0,5 % - 5 min., 0,25 % - 60 min. Sposób użycia: Preparat przed użyciem należy rozcieńczyć z wodą. Instrumenty bezpośrednio po użyciu zanurzyć w roztworze. Wszystkie części i otwory muszą być całkowicie wypełnione roztworem. Po dezynfekcji instrument wypłukać i wysuszyć. Zaleca się płukanie w wodzie o jakości min. wody pitnej a delikatne instrumenty - w wodzie destylowanej. Aktywność nieskażonego roztworu roboczego wynosi 14 dni. Ze względów higienicznych zaleca się codzienną wymianę roztworu. Nie łączyć z innymi środkami czyszczącymi lub dezynfekującymi. Pozostałości innych substancji w wannie mogą powodować w początkowej fazie stosowania mętnienie roztworu. Nie wpływa to na jakość dezynfekcji, a jedynie na efekt wizualny. Skład: 100 g preparatu zawiera: - 9,0g propionian N, N-didecylo-N-metylo-poli(oksyetyleno)amoniowy 70% Poli(oksy-1,2-etanodilo), alfa-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-omega-hydroksy-, - 7,0g dodecylo-dipropylenotriamina.